

Gebruiksaanwijzing voor het vormen van de Peesbeschermers/Tendon protectors.

Voordat u aan het verwarmen van de peesbeschermers begint, zorg dat het paard klaar staat.

- Haal de Sedelogic peesbeschermers uit de verpakking.
- Verwarm met een gewone haardroger.
- Verwarm alleen de witte of grijze binnenzijde.
- Let op: de haardroger **minimaal 5 cm** van het product afhouden, en **blijf constant in beweging**.
- Door verhitting met de haardroger zal de thermoplastische laag langzaam vervormbaar en soepel worden.
- Afhankelijk van de omgevingstemperatuur zal dit ongeveer 3 minuten duren.
- Vervolgens de peesbeschermers aanbrengen en laten uitharden, bij voorkeur het paard stil laten staan, uitharden zal ongeveer 10-15 minuten duren.
- De peesbeschermers zijn nu klaar voor gebruik.
- De peesbeschermers kunnen met de hand gewassen worden op 30 graden Celsius.
- Let op: De peesbeschermers niet direct blootstellen aan te hoge temperaturen (directe zonnestrallen via raam)
- Bovenstaande procedure kan indien gewenst herhaald worden.